



Gebruiksaanwijzing Newgel

- o Haal de Newgel uit de verpakking. Indien nodig, knip de Newgel op de juiste maat, zodat de Newgel het behandelingsgebied licht overschrijdt.
- o Was en droog het littekengebied iedere keer voor het plaatsen van de Newgel
- o Verwijder de beschermstrip en plaats de Newgel met de “kleefzijde” naar beneden, direct op het littekengebied.
- o Newgel dient voor hergebruik gewassen en in de lucht gedroogd te worden. Gebruik hier voor warm water en eventueel een neutrale (hand) zeep. Zodra de siliconenlaag droog is kleeft het verband weer. Alhoewel Newgel een zelfklevend product is, kan deze, indien nodig, extra bevestigd worden met behulp van medische tape of een andere geprefereerde methode. Bevestig de Newgel niet te strak tegen het behandelingsgebied, daar dit wellicht huidirritaties kan veroorzaken.
- o De Newgel dient dagelijks minimaal zes uur te worden gebruikt. Voor het beste resultaat kan het continu worden gebruikt. Het maximale resultaat wordt na drie tot zes maanden bereikt.
- o Indien zich een allergische reactie (huiduitslag) voordoet, stop dan het gebruik tot de uitslag is verdwenen. Vervolgens kunt u uw huid laten wennen door Newgel gedurende enkele dagen slechts kort te gebruiken en het gebruik vervolgens langzaam op te voeren. Blijven de problemen zich voor doen raadpleeg dan uw arts.
- o Newgel dient vervangen te worden als deze begint te slijten of niet meer voldoende kleefkracht heeft.
- o Bewaar de ongebruikte Newgel in de verpakking.